

Urband[®]

Technical Guide(기술가이드북)

www.Urband.com

Table of Contents

Dismantling and assembling an Urband frame -----Page 2-5

(URBAND프레임 분해하고 조립하는 법)


Frame specifications -----Page 6

(프레임 명세서)

Glazing recommendations -----Page 6


(렌즈 조립 권장 사항)

Dismantling the temples(템플 분해법)

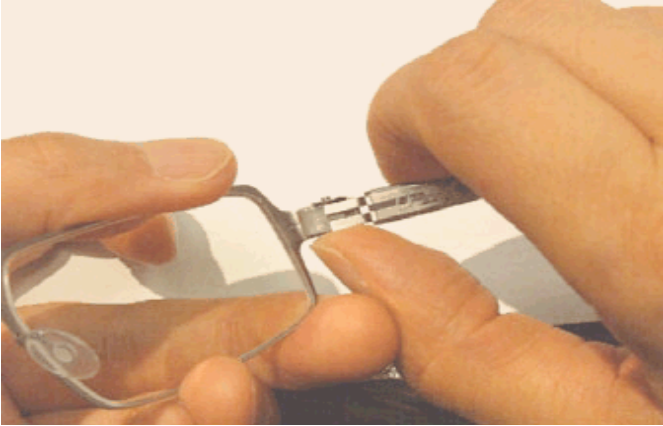


1. Position your thumb below the extension piece as shown in the picture.

-그림과같이 클립부품의 아래부분에 손가락을 위치시키세요.

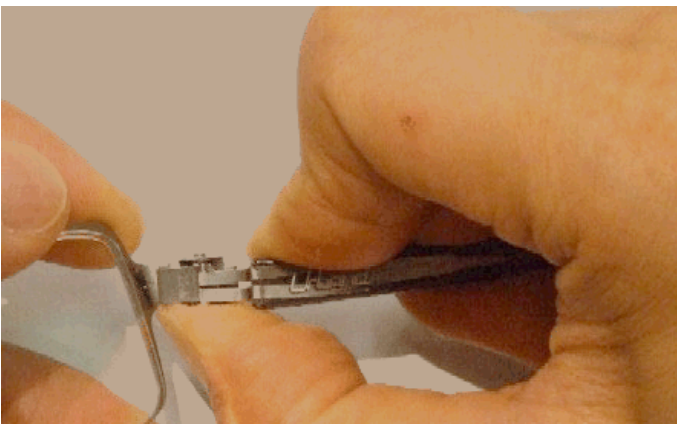


2. Press the top of the temple to take out the top pin from the pin holder

-클립홈로부터 위의핀을 밖으로 빼내기 위해 템플의 윗부분을 누르시오.

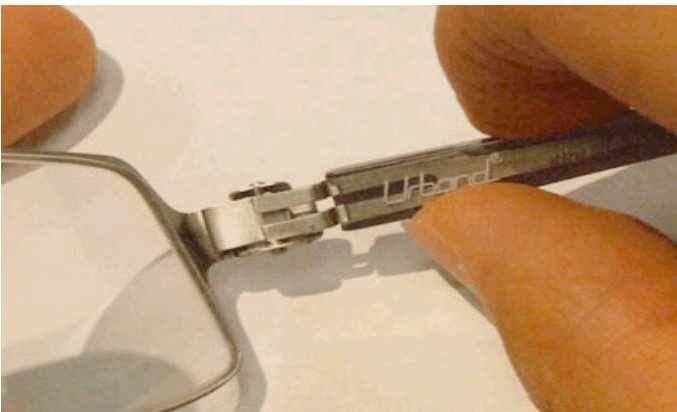

3. Once the pin is out of the pin holder, twist the temple to separate it from the front.


-다시한번, 핀이핀홈으로 부터 나오도록 누르면서, 분리되게 템플을 뒤틀는다.

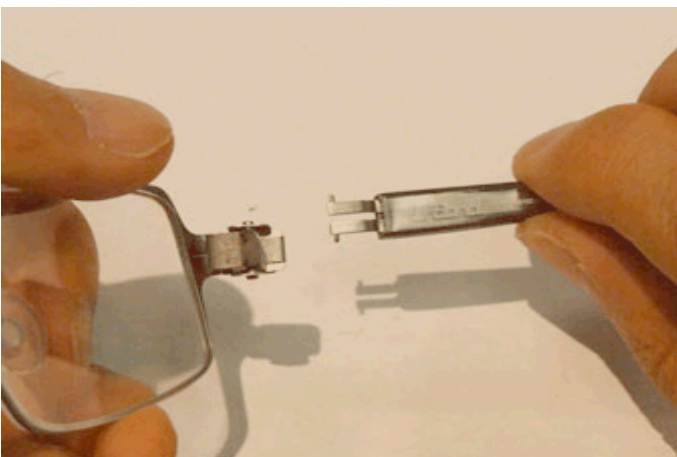

4. Once the temple is separated from the front, the S-clip appears.


템플이 프론트로부터 분리되면, S-CLIP이 나타난다.

Removing the S-clip(클립 빼내는 법)

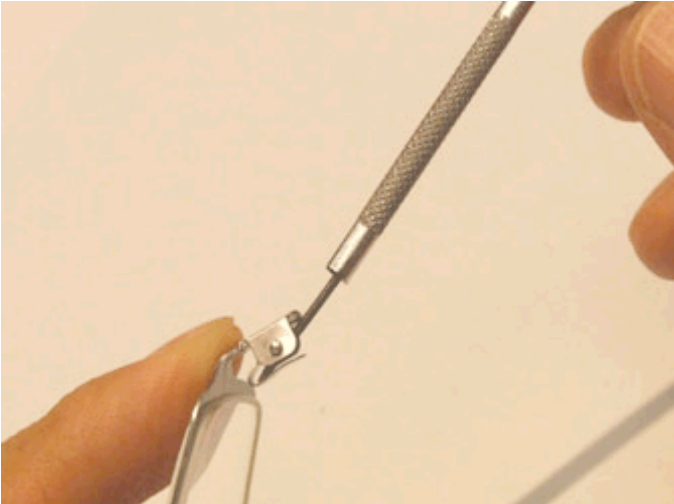


5. Use a screwdriver as a lever to slightly open the S-clip (open no more than 30 degrees).

-S-clip을 약간 열기위해, 지렛대로서 스크루드라이버를 그림과 같이 사용하세요.(30도 이상은무리가갈수 있습니다.)

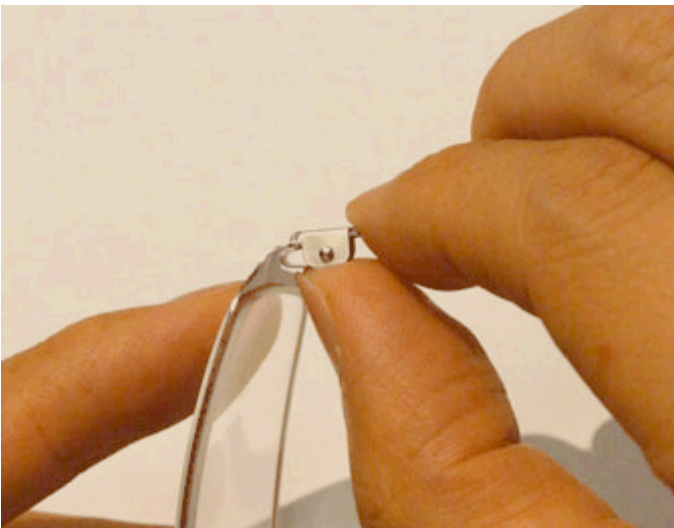

6. Simply push the S-clip out in order to release the two small hooks.


-두개의 작은 후크를탈골시키기위해 S-CLIP을 간단히 그림과 같이 아랫부분에서 밀어 당긴다.

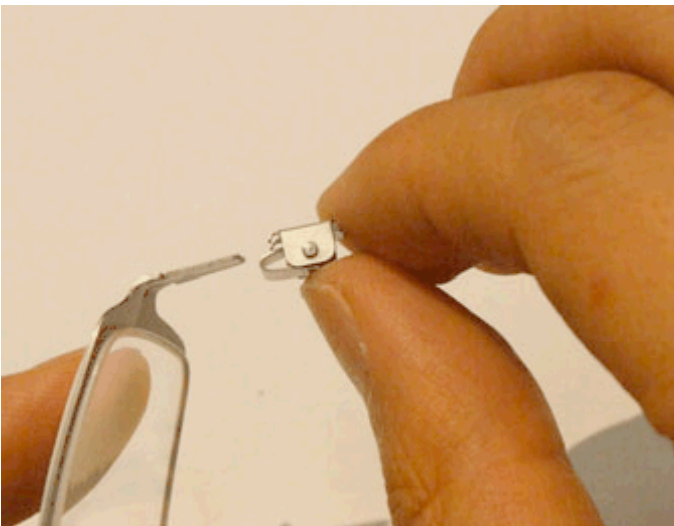

7. Slide the S-clip out as shown in the picture. You will now be able to open the front to insert or remove the lenses (Refer to the end of the guide for glazing recommendations).


- 그림과 같이 S-CLIP이 미끄러져 나온다. 데모 렌즈를 제거하거나, 넣을 수 있게 프론트를 열수 있다.

Assembling the S-clip(클립조립법)

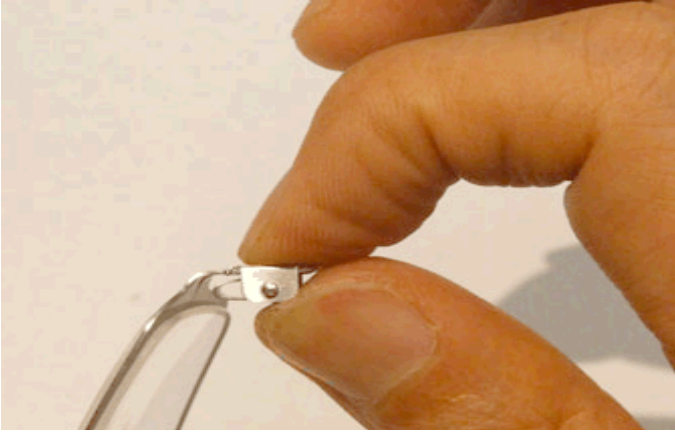

8. Once the prescription lens have been securely attached to the frame front, slide back the S-Clip. Fix the two hooks into the slots to close the front.

-처방 렌즈가 단단히 프레임 프론트에 부착하면, S-CLIP을 밀어 넣어, 홈의 갈고리에 고정 시킨다.

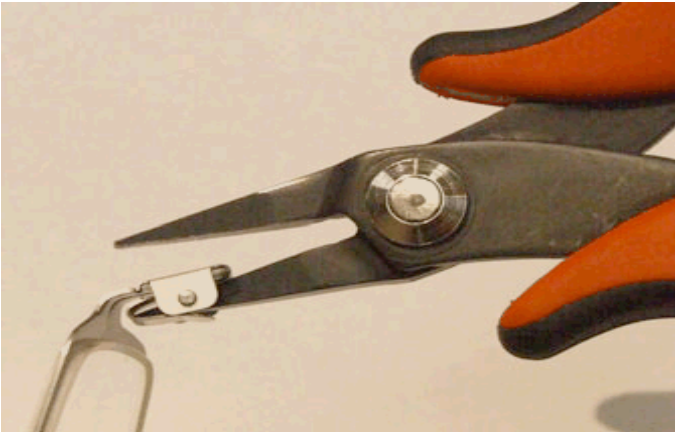


9. Insert a plier into the middle of the S-clip (as shown in the picture) to compress the S-clip.

-S-CLIP의 중간에 그림과 같이 플라이어를 끼우세요



CAUTION(주의사항)


DO NOT FLATTEN THE ENTIRE S-CLIP
전체 S-CLIP을 평평하게 하지 마시오

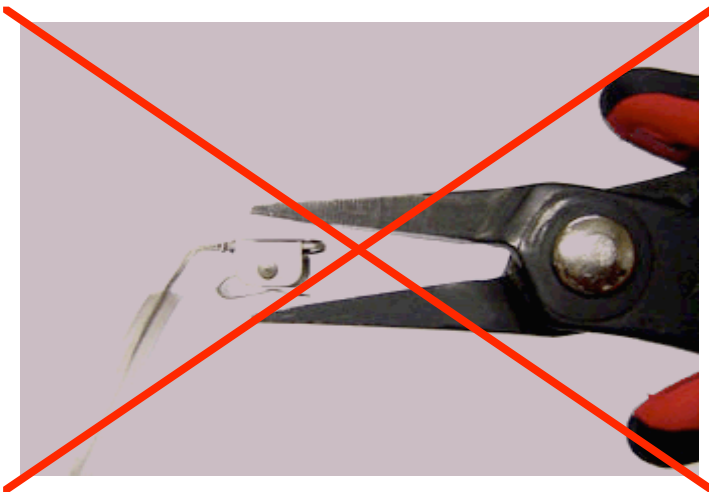

CAUTION(주의사항)

CLAMPING THE ENTIRE S-CLIP WILL CAUSE DAMAGE TO THE S-CLIP

-전체 S-CLIP을 집어누르면 S-CLIP에 손상을 일으킬 수 있다.

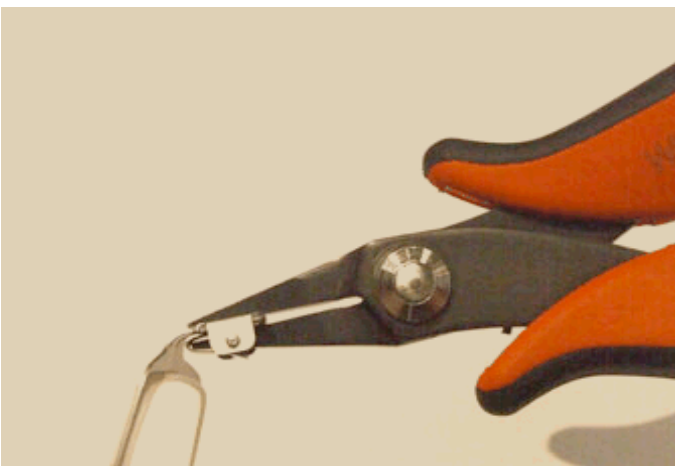


10. Press the S-clip into the extension piece to secure it to the extension piece.

-클립 고리를 안정화 시키기 위해 S-CLIP의 안쪽 고리속을 누르시오.


Re-Assembling the temples

(템플 재 조립하는법)

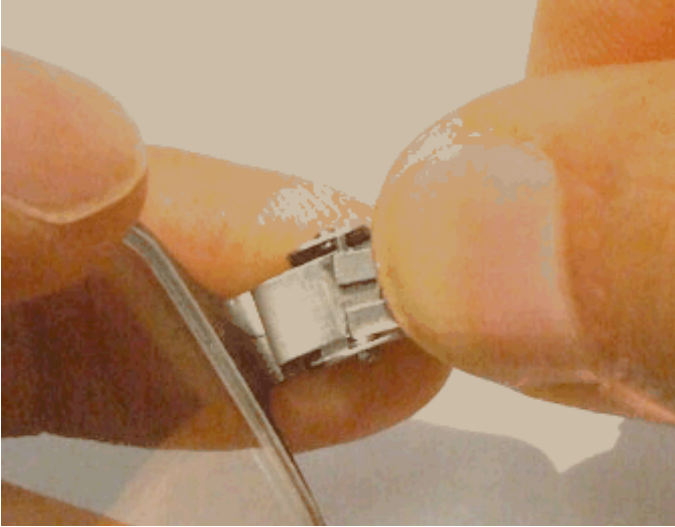

11. Using the bottom pin, press into the S-clip and insert the bottom pin into its pin holder.

-아래쪽 핀을 사용하여, S-CLIP속으로 밀고, 핀홀더 (홈) 속으로 아랫쪽 핀을 밀어 넣는다.

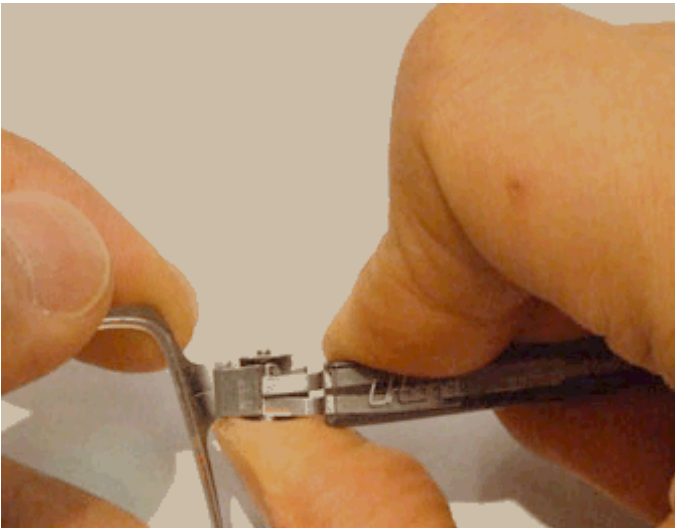

12. Press the top of the temple to insert the second pin into the top pin holder. It is easier if your thumb is below the extension piece of the frame.

-왼쪽 핀홀더(홈)에 두번째 핀을 끼우기 위해 템플의 윗쪽을 누른 채 밀어 넣는다..

Frame Specifications(프레임 명세서)

1. Front in BETA TITANIUM(전면 -베타 티타늄)
2. Thickness of the Front : 0.6 mm(프론트의 두께 -0.6mm)
3. Front Base :4- 프론트 베이스 -4커브
4. Temple Core in Stainless steel -템플심 -스테인레스 스틸
5. Temple Tips in ACETATE -템플 팁 -아세테이트
6. S-Clip made from Surgical Stainless steel - S-CLIP -의료용 스테인레스 스틸
7. 20° Flexible hinges -20도의 유연한 힌지 시스템

* In our continuous pursuit of perfection, Urband reserves the right to change the above specifications without notice.

Glazing Recommendations(렌즈 조립 권장 사항)


Lenses

Recommended Lenses(권장 렌즈)

1. MR8, Trivex or PNX. -
2. **Organic lenses of 1.6 or 1.67 indexes(굴절율 1.6또는 1.67(고굴절) 렌즈 권장).** **Avoid 1.74 index.(1.74인 초고굴절 렌즈 사용 불가)**
3. Pre-calibrated.
4. Polycarbonate.-폴리 카보네이트

Glazing(렌즈 조립)

1. Lens thickness(렌즈 두께): Minimum(최소) 2.2mm, recommended(권장) 2.5mm.
2. Depth of groove(홈의 깊이): 0.45 to 0.6 mm (0.45mm에서 0.6mm)
3. Width of groove(홈의 넓이): 0.6 or 0.7 mm

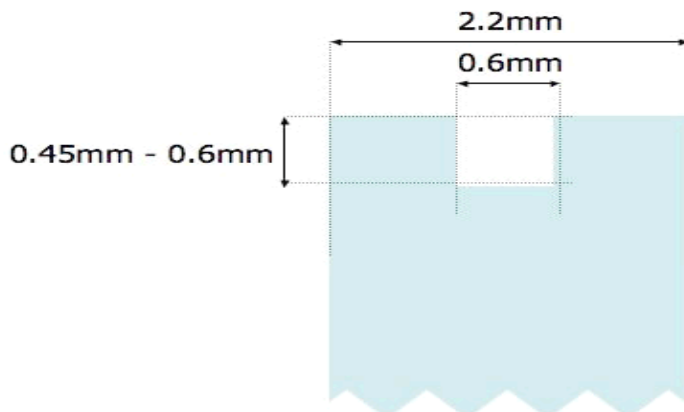

* The above only serves as a recommendation for opticians. Opticians are strongly recommended to contact the lens laboratories for further professional advice.

******About URBAND(어-밴드)*****

- 프렌치 회사가 기획하고, 우수한 일본의 안경 기술력이 만나 탄생한 고품질의 브랜드.

URBAN + BAND

	Urban(도시의)	Band(집단, 공동체)
Etymology(어원)	-Latin urbanus from Urbs ,city Relating to, characteristic of or constituting a city	- something that confines or constricts while allowing a degree of movement -Something that binds morally or spiritually- a community , a group

Technology(기술)

S-CLIP

- ➔ **Screw-less and flexible hinge eliminating any constraint(어떤 제약도 제거한 나사 없는 유연한 힌지)**
- ➔ **Unique patented Urband Technology (유일무이한 특허 등록된 Urband 기술)**
- ➔ **Surgical stainless steel for higher standards of quality(고 품질의 의료용 스테인레스 스틸)**

Beta titanium

- ➔ **lightness for a superior comfort (최상의 편안함을 위한 가벼움)**
- ➔ **->higher flexibility for a better fitting(보다 나은 착용감을 위한 더 높은 유연함)**
- ➔ **Superior resistance for dependability(믿을 수 있는 뛰어난 내성)**
- ➔ **IP(ION plating) coating for durability (내구성을 위한 IP코팅)**
- ➔ **Hypoallergenic (피부의 저자극성)**

Acetate of cellulose

- ➔ **Natural material made of wood and cotton**

(코튼과 나무로부터 만들어진 자연 소재)
- ➔ **Richness and depth in colors(칼라의 풍부함과 그윽함)**
- ➔ **Naturally comfortable(자연스럽게 편안함)**